

Unternehmen  
für den Bau von  
Hilfsmitteln für  
Senioren und Menschen  
mit eingeschränkter Mobilität



© € 2006





Abb. 1  
Wannentuchlift



- 5
  - 4
  - 3
  - 2
  - 1
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- Ladebuchse (1)  
Handbedienung (2)  
Integrierter Haltegriff (3)  
Akkuladezustandsanzeige (4)  
Gehäuseöffnung (5)  
Fußbodenbefestigung (6)  
Haltestange (7)  
Tragband (8)  
Gleiter (9)

### Zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, den Wannentuchlift sicher und sachgerecht zu betreiben. Die Beachtung hilft Gefahren, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen.

In dieser Bedienungsanleitung sind gekennzeichnet:

#### Sicherheitshinweise (Fettdruck)

#### Achtung (Fettdruck)

*Hinweis, Tipp (kursiver Druck)*

### 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Wannentuchlift ist für den Einsatz in Badewannen bestimmt. Der Wannentuchlift wurde entwickelt, um Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit wieder zu ermöglichen, ohne fremde Hilfe Ihren persönlichen hygienischen Bedürfnissen nachzukommen (Wannenbad).

### 2. Sicherheitshinweise

#### Immer vor und während der Benutzung beachten!

- **Bodenhaltestange (7) sichern.**
- **Beim Einrollen nicht in Gehäuseöffnung (5) eingreifen.**
- **Ladebuchse (1) mit Stopfen vor Spritzwasser schützen.**
- **Ladestecker nicht mit Gewalt in die Ladebuchse einstecken.**
- **Keine anderen Stecker in die Ladebuchse einstecken.**
- **Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist das Ladegerät zu entfernen.**

### 3. Technische Beschreibung

- Alle funktionsrelevanten Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt.
- Die Motorfunktion ist mit mechanischer und elektrischer Sicherheitsabschaltung ausgelegt.
- Das Tragband (8) ist aus hochreißfester pflegeleichter Polyamidfaser mit hochwertiger Polyurethan-Beschichtung.
- Der speziell für diese Stoffart entwickelte Gleiter (9) ermöglicht ein leichtes Absenken auf den Wannenboden und zurück, ohne ständig nachrücken zu müssen.
- Der integrierte Haltegriff (3) aus Edelstahl in der Mitte des Chassis, gewährt die nötige Sicherheit bei der Benutzung des Gerätes.

Das Gerät ist „Made in Germany“ und wurde vom Hersteller nach den Normen der EU-Maschinenrichtlinie hergestellt.

**Das Produkt ist kein Behindertenhilfsmittel.**

### 4. Bedienung

#### 4.1. Vorbereitung

##### Akku prüfen:

Prüfen Sie bitte vor Benutzung des Bades den Akkuzustand des Gerätes.

In der Mitte des Gerätes, unterhalb des integrierten Haltegriffes, befindet sich die optische Akkuzustandsanzeige (4) die ständig über den aktuellen Ladezustand informiert.



Die Leuchtdioden kennzeichnen folgende Ladezustände:

- Grüne LED: Batterie ist voll geladen
- Gelbe LED: Batterie ist noch ausreichend geladen, muss aber demnächst geladen werden.
- Rote LED: Batterie ist leer und muss geladen werden

#### Tragband vorbereiten:

Tragband mit Haltestange an der Fußbodenbefestigung einhängen und spannen bis es **automatisch** abschaltet.

*Achten Sie darauf, dass das Band mit Haltestange immer mittig in der Bodenhalterung fixiert und die Sicherung (Abb. 3) eingerastet ist.*

#### 4.2. Der eigentliche Badevorgang

1. Setzen Sie sich nun ganz normal rückwärts auf das Band.
2. Drehen Sie sich seitlich bis Sie den Haltegriff fassen können.
3. Schwenken Sie Ihre Beine in die Wanne.
4. Nehmen Sie eine entspannte Position ein und lassen Sie sich durch Drücken der Taste „AB“ in die Wanne absenken (Abb. 4 und Abb. 5).

Durch leichte Gewichtsverlagerung nach außen erreichen Sie, dass Sie auf dem Gleiter sitzend, nicht nachrücken müssen, während sich das Band senkt. Nachdem Sie die untere Position erreicht haben, lassen Sie bitte die Taste „AB“ los.

Sie haben jetzt Ihre Badeposition erreicht und können Ihr Vollbad genießen.

5. Nachdem Sie Ihr Bad genommen haben, heben Sie sich durch Drücken der Taste „AUF“ wieder in die obere Position.

**Achtung:** Die eingebaute Steuerung erkennt, wenn Sie die Tasten beim Hochfahren verwechseln. Sollten Sie versehentlich die Taste „AB“ drücken, bleibt der Motor nach kurzer Zeit stehen.

*Benutzen Sie bitte jetzt die Taste „AUF“, um Hochfahren zu können.*

6. Schwenken Sie Ihre Beine aus der Wanne und stehen Sie auf.

#### 5. Reinigung / Wartung

Gönnen Sie dem Band etwas Trockenzeit. Bevor Sie es wieder endgültig aufrollen können, müssen Sie den nassen Teil des Bandes wieder ausrollen und trocknen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie das Band nicht zu weit einrollen, damit das Ende des Bandes nicht in das Gehäuse eingezogen wird. Wenn Sie das Band einziehen wollen, müssen Sie vorher den Gleiter entfernen.

#### Achtung:

**Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind grundsätzlich bei entferntem Ladegerät vorzunehmen!**

#### 6. Technische Daten

- Abmessungen: 550 mm (Länge) x 115 mm (Breite) x 280 mm (Höhe)
- Gewicht: 11 kg.
- Akkugerät mit hoher Kapazität 2,2 Ah für sehr lange Betriebszyklen.
- Der Motor wird mit 24 V Gleichspannung betrieben und hat eine maximale Leistung von 14 Nm.
- Die elektronische Steuerung und Zustandsüberwachung ist auf 170 kg begrenzt.
- Schutzgrad IP66 (spritzwassergeschützt)
- Die Bedienung des Gerätes erfolgt über eine Handbedienung.
- Standardfarbe des Chassis ist weiß. Andere Sanitärfarben sind lieferbar.

Abb. 2  
Akkuladezustandsanzeige



Abb. 3  
Einrasten der Haltestange  
in Fußbodenhalterung



Abb. 4  
Handbedienung



AUF AB



Abb. 5  
Absenk- / Hebevorgang







### 8. Der Ladevorgang

Wird beim Absenken erkannt, dass der Akku nicht mehr ausreichend Energie besitzt um einen vollen Zyklus durchzuführen, bleibt der Motor stehen. Es kann nur noch einmal nach oben gefahren werden. Danach muss der Akku an das Ladegerät angeschlossen werden.

**Achtung: Zuerst das Ladegerät in die Netzsteckdose einstecken und dann erst mit der Ladebuchse am Gerät verbinden. Wenn der Akku ausreichend geladen ist, leuchtet die grüne LED am Ladegerät. Der Akku ist bei Lieferung nur 50% geladen. Vor dem ersten Gebrauch bitte den Akku wie beschrieben mindestens 5 Std nachladen, damit dieser seine volle Leistung erbringen kann.**

### 9. Störungen und deren Beseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Band senkt nicht genug ab	Fehlbedienung	Band nach oben fahren bis es <b>automatisch</b> abschaltet
Band fährt nur noch hoch (rote LED leuchtet)	Akku ist leer	Akku laden
Band fährt zum Einhängen am Boden nicht weit genug ab	Umpulsperre aktiv	Taste "AB" halten und zusätzlich "AUF" Taste kurz antippen. Danach senkt das Band weitere 20 Sek ab.
Band rollt nur noch auf und nicht mehr ab (Version vor 15.12.06)	Falsche Taste gedrückt	Gerät muss an der Wand unter Kraftaufwand ausgehangen werden. Danach das Band bis zum Umkehrpunkt ausrollen und mit der richtigen Taste "AUF" wieder einrollen.
Band bekommt farbige Flecken.	Band öfter nach dem Baden nicht getrocknet	Band nach Benutzung wieder ausrollen und trocknen lassen.
Band ist etwas schief aufgerollt.	Versetztes Sitzen beim Aufrollen (Heben)	Band noch einmal neu aufrollen und dabei etwas glatt ziehen.
Alle 3 LED leuchten	Gerät hat eingestellte Maximallast benötigt.	Kurz in andere Richtung fahren. Anzeige erlischt wieder.
Gerät lädt nicht mehr	Steckdose defekt	Sicherung überprüfen
	Lader defekt	Service anrufen, neuen Lader zuschicken lassen.
	Ladebuchse defekt	Service verständigen, ggf. Gerät zum Hersteller einschicken
Gelbe LED leuchtet dauerhaft	Ladebuchse defekt	Service verständigen, ggf. Gerät zum Hersteller einschicken

### 10. Für den Servicefall / Garantie

*Die Gewährleistung für den Tuchwannenlift beträgt 5 Jahre. Auf den eingebauten Akku gewähren wir 1 Jahr.  
Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung ist das Gerät dem Hersteller zuzuführen. Bevor Sie Ihr Gerät, wie vom Monteur gezeigt, an der Wand abhängen und dem Hersteller in geeigneter Verpackung zuschicken, setzen Sie sich bitte zuerst mit der Herstellerfirma in Verbindung. Diese wird dann mit Ihnen versuchen, die Probleme telefonisch zu lösen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein das Band zurückzuschicken, dann können wir auch mit Ihrem Einverständnis einen kostenpflichtigen Abholdienst beauftragen, der das Gerät dem Hersteller zuführt.  
Sie erhalten dann umgehend Ihr repariertes Gerät zurück.*



Vertriebsgesellschaft:  
Firma MOBIFLEX  
Vogelherdstr. 5  
D-04838 Doberschütz  
Deutschland  
Tel.: (0)3423 758805  
Funk: (0)1577 2549080