

BEDIENUNGSANLEITUNG

Liegewannen Typ Madrid, Rom, Paris

Version3/2010



Mobiflex GmbH
Altersgerechte Hilfsmittel
Vogelherdstrasse 5
D- 04838 Doberschütz

MF
MobiFlex

Zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise welche helfen sollen die Wannen sicher und fachgerecht zu benutzen. Die Beachtung hilft Gefahren, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden, sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Wannen und Liftsysteme zu erhöhen.

1. Bestimmungsmäßiger Gebrauch


Die Wannen wurden entwickelt um Personen mit altersbedingt eingeschränkter Beweglichkeit wieder zu ermöglichen ohne fremde Hilfe ihren persönlichen hygienischen Bedürfnissen nachzukommen.



2. Sicherheitshinweise

Immer vor und während der Benutzung beachten !

- Bei geschlossener Tür nie auf die Tür setzen (zerstört Türdichtung)
- Beim Einsteigen auf sicheren Stand achten
- Tür fest verriegeln
- Vor dem Wassereinlassen Verbrühssperre an der Armatur prüfen
- Kein Wasser über 50°C einlassen (Zerstört Kunststoffoberfläche)
- Bei der Variante mit integriertem Lift beim Absenken darauf achten, dass das Lifttuch fest eingeschoben ist und beim Absenken keine Körperteile zwischen Wannenrand und Liftbügel kommen.
- Beim Absenken beachten, dass keine Gegenstände unter dem Lift sind (Motorblockierung)
- Bei Duschvorgängen darauf achten, dass die oberen Flachdichtungen auf den Hubbuchsen aufliegen
- Bei der Reinigung keine Putzmittel mit Schleifzusatz verwenden
- Bei Whirlpoolversion darauf achten, dass die Düsen nicht abgedeckt sind (zerstört das Luftzuleitungssystem)

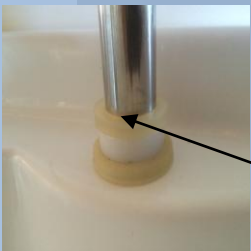

3. Technische Beschreibung

Der Wannenkörper besteht zu 100% aus Polyesterglasfaserkunststoff mit einer mechanisch und chemisch sehr widerstandsfähigen Oberfläche. Die thermische Belastung sollte kurzfristig 45° nicht überschreiten. Der Verschluss ist je nach Ausführung aus Kunststoff cremweiss (Madrid, Rom) Tür nach innen öffnend oder



aus poliertem Edelstahl (Paris) Tür nach außen öffnend

Bei Einsatz eines Liftsystems !

Das integrierte aus korrosionsbeständigem Stahl bestehende unter dem Wannenkörper montierte Liftsystem bewegt die an 4 Edelstahlhubstangen aufgehängte Sitzform.

Das Sitztuch ist aus pflegeleichtem abwaschbarem hochreißfesten Material gefertigt. Die Hubstangen können zusätzlich noch durch eine Edelstahlrückenlehne mit Rückenpolster verbunden werden.

Die Durchführungen sind spritzwassergeschützt wenn die oberen Abdichtungen fest aufliegen. Vor dem Duschen immer erst die Abdichtungen herunter drücken und mit dem Lift einige Zentimeter nach unten fahren, damit die Abdichtungen fest aufliegen.

Die Bedienung des Liftes erfolgt über Kabelhandbedienung oder als Option mit Touchpad auf dem Wannenrand.



Hubliftunterbau

Bei vorhandenem Whirlpoolsystem !

Der Whirlpool wird durch drücken der Taste „*“ ein oder ausgeschaltet. Durch drücken der Taste „+/-“ kann die Stärke eingestellt werden und die Taste „~“ schaltet in den Massagemodus. Nach ca. 10 Minuten beginnt nach dem Ausschalten des Systems die automatische Trocknung für ca. 3-5 Minuten.

Unbedingt beachten!

Die Düsen dürfen nicht durch Matten o.ä. abgedeckt sein, da sonst das Luftzuleitungssystem zerstört wird.!

Kurzzeitiges schließen einzelner Düsen durch Körperteile schaden dem System nicht.

Bitte bei den ersten Versuchen mit dem Whirlpoolsystem langsam die Intensität und Dauer steigern, damit der Körper sich allmählich an die Massagen gewöhnt und ein eventueller „Muskelkater“ am nächsten Tag vermieden wird.

Das System ist auf Luftbasis und benötigt deshalb keine chemischen Reinigungsmittel um die Zuleitungen zu reinigen. Die automatische Trocknung übernimmt diese Aufgabe umweltschonend.



Touchpadbedienung



Whirlpoolbedienung



Whirlpoolsystem unter der Wanne

4. Der eigentliche Badevorgang



Öffnen Sie die Tür, und betreten die Wanne.
Schließen Sie die Tür und verriegeln Sie die Wanne sorgfältig.
Stellen Sie ihre gewünschte Wassertemperatur am Temperaturwahlgriff ein, öffnen Sie die Thermostatarmatur indem Sie den Kipphebel nach oben drehen und setzen sich in die Wanne. Sie können jetzt mit dem Baden beginnen. Schließen Sie die Armatur wenn genügend Wasser eingelaufen ist.



Sollten Sie sich nur Duschen wollen, beachten Sie bei einer Version mit Lift, dass die oberen Flachringe auf den Hubbuchsen aufliegen und Sie mit dem Lift einige Zentimeter nach unten gefahren sind.

Nach dem Baden stehen Sie auf, öffnen den Exenterablauf und können dann schon mit dem Frottieren beginnen solange das Wasser ausläuft. Wenn der Wasserstand unterhalb der Türschwelle ist, können Sie die Tür öffnen und die Wanne verlassen.

5. Reinigung/Pflege

Nach dem Baden die Wanne mit Wasser ausspülen und eventuell trocken reiben.

Bei Hubliftversion dabei beachten dass die Dichtungen aufliegen und kein anhaltendes direktes Strahlwasser auf die Durchführungen gelangt. Das Tragtuch trocken reiben oder in gehobener Stellung selbst trocknen lassen.

Um die Silikondichtung zu schonen, sollte die Tür bei Nichtbenutzung nicht verriegelt werden, sondern etwas geöffnet sein.

Wollen Sie starke Verschmutzungen beseitigen, bitte keine Putzmittel mit Scheuerzusatz verwenden. Dieses würde die Oberfläche der Wanne beschädigen.

Bei Hubliftversion die Hubstangen von Seifenresten befreien, damit die Gleitfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Die Silikondichtfugen um die Wanne herum nicht mit spitzen Gegenständen bearbeiten und öfters auf funktionierende Abdichtung prüfen. Bei Rissbildung oder fehlender Fugen den Service verständigen, damit dieser die Dichtheit an den Rändern wieder herstellt und somit kein Wasser unter die Wanne gelangen kann.

5. Für den Schadensfall/Garantie

Unsere AGB's wurden Ihnen übergeben oder sind im Internet auf unserer Homepage einsehbar.

Die Gewährleistung für unsere Produkte und Serviceleistungen beträgt 2 Jahre ab Datum des Gefahrübergangs (Einbaudatum).

Mängelrügen sind schriftlich einzureichen. Wir bessern im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen nach. Wir leisten keine Gewähr für Schäden die durch unsachgemäße und ungeeignete Verwendung entstanden sind. Ebenso sind Schäden welche durch natürliche Abnutzung entstanden sind von der Gewähr ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden welche nicht selbst am Liefergegenstand entstanden sind.

Serviceanschrift für den Schadensfall

Mobiflex GmbH
Altersgerechte Hilfsmittel
D- 04838 Doberschütz
Deutschland
Tel. +49(0)3423 7589940

Mail: info@mobiflex-gmbh.eu
Web: www.mobiflex-gmbh.eu